



# meinbruno**PLUS**


Durch die patentierte Aufhängung wird der bewährte meinbruno zum Faszientherapeuten am ganzen Körper. Jede gewünschte Höhe ist zentimetergenau auf Ihre Körpergröße einstellbar. Durch unkompliziertes Aufhängen über Tür oder Stuhlrücken können Sie gezielt vom Schulter- und Nackenbereich etc. behandeln.

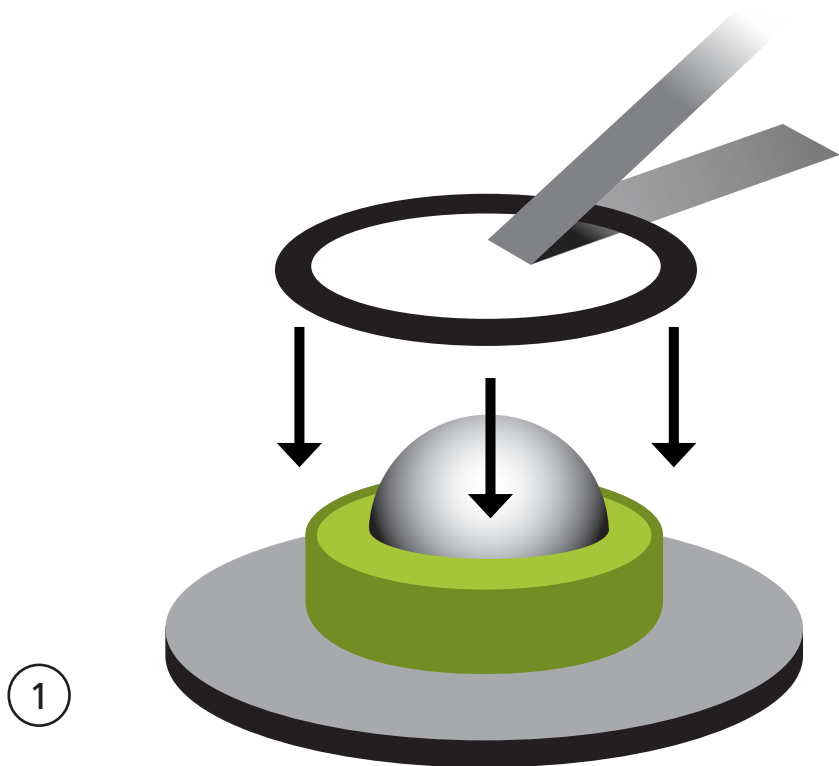


Führen Sie eine Seite des Bandes durch den Haltering und schließen Sie den Klettverschluss: Stülpen Sie den Haltering über die farbige Buchse mit der Kugel.

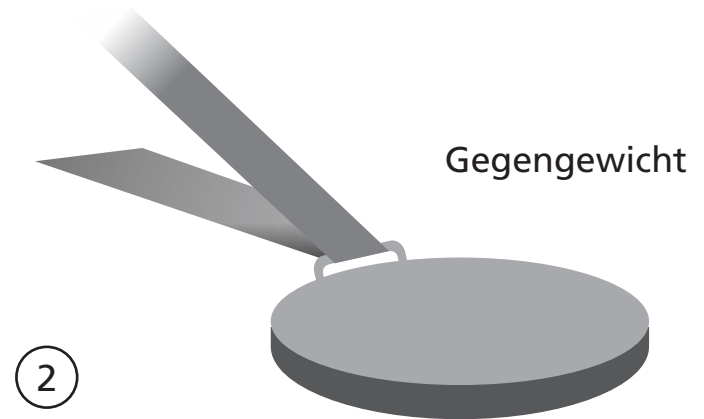

Die andere Seite des Klettbandes führen Sie durch die Metallöse des Gegengewichtes und verschließen wiederum den Klettverschluss.

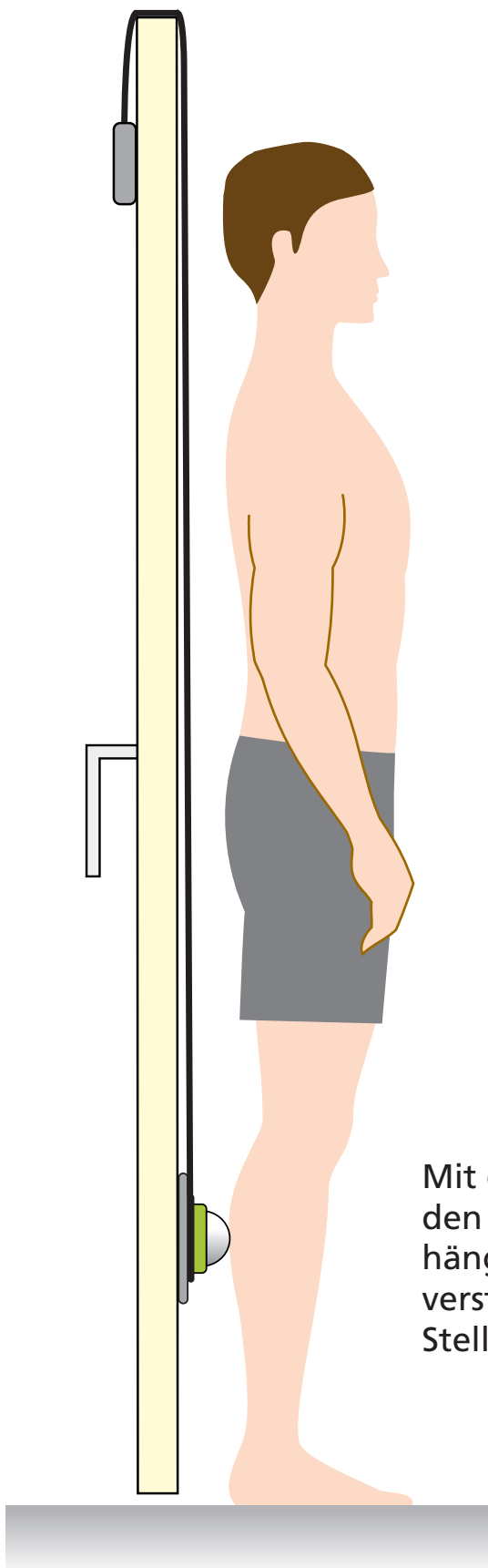

Mit dem langen Band können Sie den meinbruno nun über die Türe hängen und bequem in der Höhe verstellen um jede gewünschte Stelle am Körper zu behandeln.

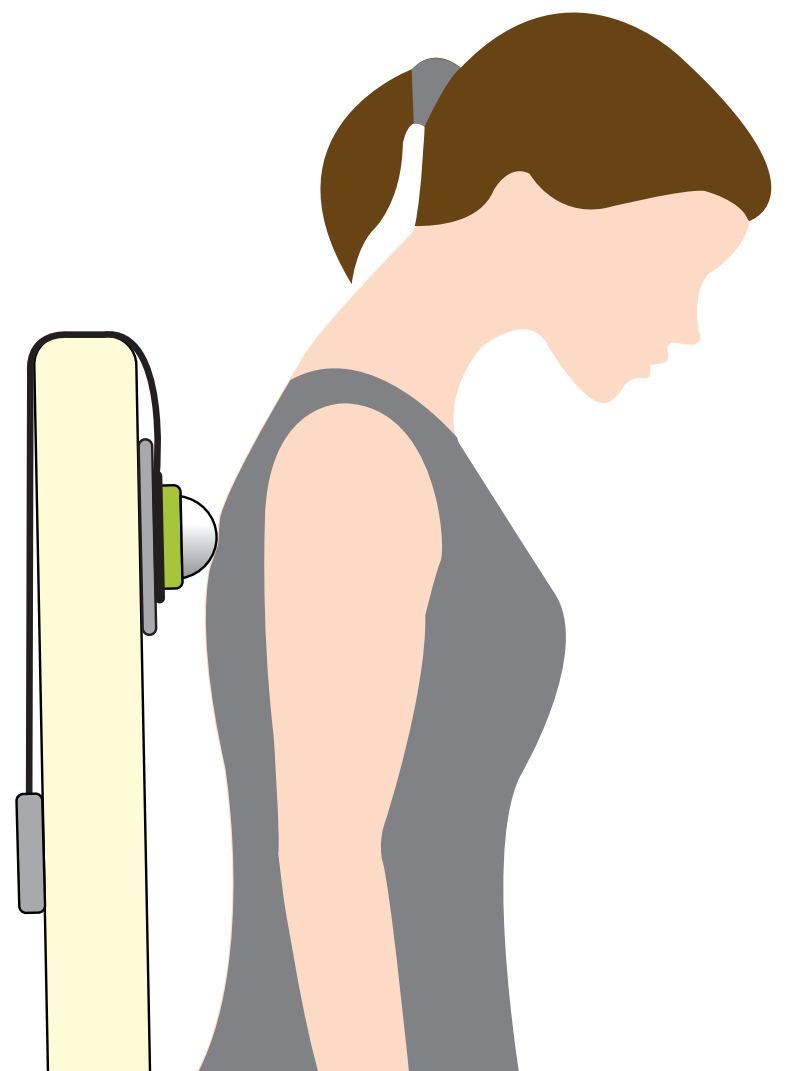

Das kurze Band verwenden Sie im Sitzen (Schreibtischstuhl/Stuhl/Sofa) und hängen es über Bürostuhl, Stuhl oder Sofa.